



Art.-Nr.: 4-335

Kunststoffschale zur Lagerung eines Rollboards am Fußteil der Trage (mit Auszugsfunktion)



Entnahme des Rollboards

- Durch Zug an der rot-markierten Lasche wird das Rollboard unter der Tragenauflage herausgezogen (die Entnahme des Rollboards ist auch bei einem aufliegenden Patienten möglich)



Aufbewahrung des Rollboards

- Rollboard zusammenlegen
- Rollboard unterhalb der Auszuglasche auf die Kunststoffplatte auflegen
- Rollboard einschieben



Befestigung des Auszugs

- einmalige, unkomplizierte Befestigung des Auszugs am Fußteilblech der Trage mittels Druckknopfverbindung

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage und erteilt Ihnen gerne das SCHNITZLER-Team

YouTube Schnitzler Rettungsprodukte

Instagram @Schnitzlerrettungsprodukte

Facebook Schnitzler Rettungsprodukte